

NICE

SISTEMA DE TERAPIA DE FRIO + COMPRESSÃO NICE1

CONCEBIDA PARA O REGRESSO



Concebida para atletas de elite com a ajuda de cirurgiões ortopédicos, engenheiros e designers industriais de topo.

O NICE1 proporciona uma terapia de frio precisa sem gelo, ao mesmo tempo que proporciona compressão para ajudar a reduzir o inchaço. Estas terapias altamente eficazes foram integradas numa embalagem pequena (21,84 cm L x 21,84 cm A x 22,86 cm P) e leve, com uma interface gráfica de ecrã táctil extremamente intuitiva que facilita a sua utilização.



ARREFECIMENTO

NICE1 proporciona um arrefecimento terapêutico sem gelo à temperatura indicada por um médico.



COMPRESSÃO

Fornecer compressão intermitente e dinâmica, conforme prescrito por um médico.



PROGRAMÁVEL

Permite configurações programáveis de tempo, temperatura e compressão para fornecer o tratamento conforme indicado por um médico.

**THIS
IS NICE**

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Contacte um representante do cliente através do número (888) 815-9907 ou envie um e-mail para info@nicerecovery.com

LOCALIZAÇÃO:

2205 Central Ave.,
Boulder, CO 80301



ORGULHOSAMENTE
FABRICADO NO COLORADO

VISITAR:

nicerecovery.com



US
SKI &
SNOWBOARD

Fora dos Estados Unidos: Por favor, contacte o seu distribuidor local.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

FAIXA CERVICAL

Consulte um profissional de saúde antes de utilizar este produto



Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação externa. Ligue o conector circular à parte de trás da unidade de arrefecimento. Ouvirá um clique quando estiver corretamente ligado. Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.



Ligue o tubo flexível à unidade de controlo. Ouvirá um clique quando estiver corretamente ligado.



Coloque a faixa na parte do corpo adequada. Aperte com tiras de Velcro. Ligue o tubo flexível à faixa. Ouvirá um clique quando estiver corretamente ligado.

Utilização da interface



01


Ligue o interruptor de alimentação na parte de trás do dispositivo. O ecrã táctil ilumina-se e apresenta o logótipo "Nice". Prima Start (Iniciar). Reveja a lista de verificação no ecrã táctil. Confirme e prima **NEXT** (SEGUINTE).



02

Selecione o valor de **COLD LEVEL** (NÍVEL DE FRIO) pretendido e prima **NEXT** (SEGUINTE). (O nível 5 é a regulação mais fria) **AS DEFINIÇÕES DE FRIO SÃO AS SEGUINTE:**

Nível 1 = 14,4 °C
Nível 2 = 12,4 °C
Nível 3 = 10 °C
Nível 4 = 7,7 °C
Nível 5 = 5,5 °C

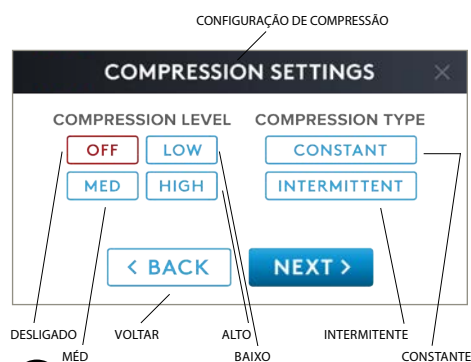


03

Selecione os valores de **COMPRESSION LEVEL** (NÍVEL DE COMPRESSÃO) e o **COMPRESSION TYPE** (TIPO DE COMPRESSÃO) pretendidos e prima **NEXT** (SEGUINTE).



04

Escolha uma configuração de tempo **MANUAL** de 5 a 40 minutos para uma única sessão de terapia OU escolha um **PRESET PROGRAM** (PROGRAMA PREDEFINIDO) para várias sessões e prima **NEXT** (SEGUINTE).

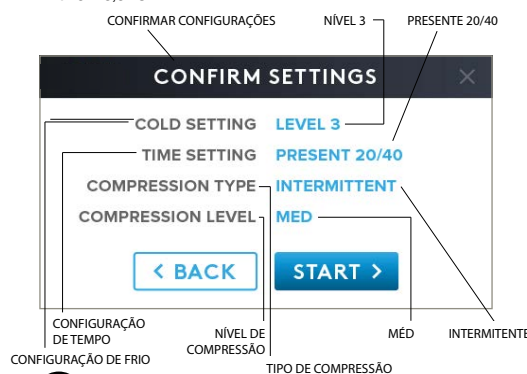



05

Reveja e confirme as suas configurações, premindo **START** (INICIAR) ou prima **BACK** (VOLTAR) para alterar as configurações.



06

Durante a sessão de terapia, pode alterar as configurações de frio ou de compressão, premindo simplesmente **1 – 5** ou **HIGH** (ALTO), **MED** (MÉD) ou **LOW** (BAIXO). Para escurecer, prima o interruptor Dim (Escurecer), para clarear – toque no ecrã.

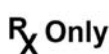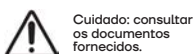

Cuidado: a lei federal restringe a venda deste dispositivo a um médico ou por ordem deste.




Consultar o Manual do Utilizador e as etiquetas. Seguir as instruções de utilização.



Número de série



Dispositivo médico

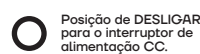

Alimentado por corrente contínua

Posição de LIGAR para o interruptor de alimentação CC na parte de trás da unidade de controlo.



Consulte o manual do utilizador, contacte um representante da assistência ao cliente através do número (888) 915-9907 ou envie um e-mail para info@nicerecovery.com



Peças aplicadas do tipo BF



Nice Recovery Systems LLC
2205 Central Ave, Suite A
Boulder, CO 80301



Data de fabrico



Reciclar: não colocar a unidade no lixo normal.



Limitação da pressão atmosférica



Limitação da humidade



Limite de temperatura

IP21



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Alemanha