

INSTRUÇÕES DE INTEGRAÇÃO CERVICAL



01 ALMOFADA CERVICAL

Retire o colar cervical Aspen Vista® e a almofada cervical NICE da embalagem.



02 COLOCAÇÃO

Separe os painéis frontal e posterior do colar e, em seguida, centre e fixe o colar cervical NICE na almofada de espuma do painel posterior. Certifique-se de que o Velcro da almofada cervical NICE está bem preso à almofada de espuma e que o tubo flexível está direcionado para baixo.



03 FIXAÇÃO

As abas da faixa apontam para baixo para acompanhar o ângulo da linha do maxilar e o bordo superior da almofada cervical alinha-se com o bordo superior do colar.



04 AJUSTE

Com a almofada cervical NICE colocada corretamente na almofada posterior do colar, siga as instruções de aplicação fornecidas com o colar cervical Aspen Vista® para um ajuste geral adequado.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E A GARANTIA

<https://www.aspenmp.com/vistar-cervical-collar.html>

<https://www.nicerecovery.com/instructions/therapy-wrap-instructions-for-use>

*Este produto não se destina a ser utilizado com compressão.

Para mais informações:

Contacte um representante do cliente através do número (888) 815-9907 ou envie um e-mail para info@nicerecovery.com

Localização:

2205 Central Ave.,
Boulder, CO 80301



ORGULHOSAMENTE
FABRICADO NO COLORADO

Visitar:

nicerecovery.com



US
SKI &
SNOWBOARD



6-1011-01-PT REV. A

**THIS
IS NICE**

Fora dos Estados Unidos: Por favor, contacte o seu distribuidor local.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

NICE + INTEGRAÇÃO DE COMPRESSÃO A FRIO ASPEN

Consulte um profissional de saúde antes de utilizar este produto



- Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação externa.
- Ligue o conector circular à parte de trás da unidade de arrefecimento. Ouvirá um clique quando estiver corretamente ligado.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.



- Ligue o tubo flexível à unidade de controlo. Ouvirá um clique quando estiver corretamente ligado.



- Coloque a faixa na parte do corpo adequada. Aperte com tiras de Velcro.
- Ligue o tubo flexível à faixa. Ouvirá um clique quando estiver corretamente ligado.



PASSO 1

Ligue o interruptor de alimentação na parte de trás do dispositivo. O ecrã táctil ilumina-se e apresenta o logótipo "Nice". Prima Start (Iniciar). Reveja a lista de verificação no ecrã táctil. Confirme e prima NEXT (SEGUINTE).




PASSO 2

Selecione o valor de COLD LEVEL (NÍVEL DE FRIO) pretendido e prima NEXT (SEGUINTE). (O nível 5 é a regulação mais fria).


As configurações de frio são as seguintes:

Nível 1 = 14,4 °C
Nível 2 = 12,4 °C
Nível 3 = 10 °C
Nível 4 = 7,7 °C
Nível 5 = 5,5 °C

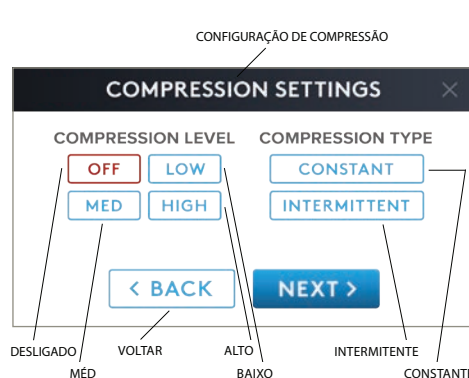


PASSO 3

Selecione os valores de COMPRESSION LEVEL (NÍVEL DE COMPRESSÃO) e o COMPRESSION TYPE (TIPO DE COMPRESSÃO) pretendidos e prima NEXT (SEGUINTE).

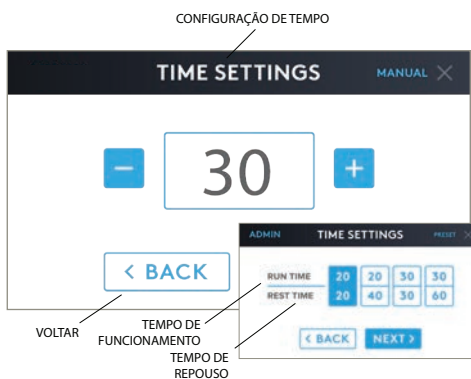

PASSO 4

Escolha uma configuração de tempo MANUAL de 5 a 40 minutos para uma única sessão de terapia OU escolha um PRESET PROGRAM (PROGRAMA PREDEFINIDO) para várias sessões e prima NEXT (SEGUINTE). Nota: os programas de temporização predefinidos estão numa memória de 10 ciclos.

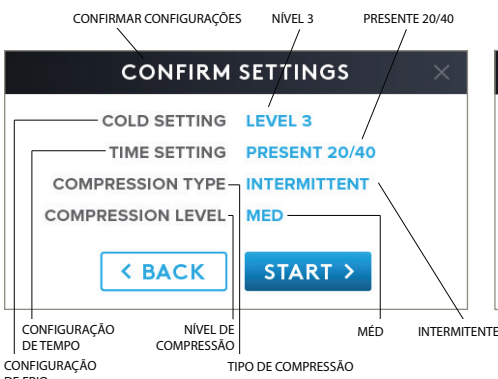

PASSO 5

Reveja e confirme as suas configurações, premindo START (INICIAR) ou prima BACK (VOLTAR) para alterar as configurações.



PASSO 6

Durante a sessão de terapia, pode alterar as configurações de frio ou de compressão, premindo simplesmente 1 – 5 ou HIGH (ALTO), MED (MÉD) ou LOW (BAIXO). Para escurecer, prima o interruptor Dim (Escurecer), para clarear – toque no ecrã.



Cuidado: consultar os documentos fornecidos



Cuidado: a lei federal restringe a venda deste dispositivo a um médico ou por ordem deste.



Dispositivo médico



Nice Recovery Systems LLC
2205 Central Ave, Suite A
Boulder, CO 80301



Data de fabrico



Consulte o manual do utilizador, contacte um representante da assistência ao cliente através do número (888) 815-9907 ou envie um e-mail para info@nicerecovery.com



Não estéril



Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de utilização



Não contém látex de borracha natural



Utilização múltipla num único doente



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Alemanha